

Bulletin technique

NetMedic⁺

DIN 02402319

NETTOYANT, DÉGRAISSANT ET DÉSINFECTANT



Introduction

NetMedic⁺ est conçu pour nettoyer, dégraisser, désodoriser, assainir et désinfecter en une seule étape selon la concentration utilisée. C'est le produit idéal à utiliser pour nettoyer et désinfecter vos équipements et accessoires rapidement avec l'application d'un seul produit.

Propriétés spécifiques & rendement

NetMedic⁺ est un produit conçu pour nettoyer, dégraisser et désinfecter adéquatement vos équipements ConfortMédic tel que baignoire, chaise, lève-personne, civière, etc. Ce produit peut être utilisé seul pour nettoyer et assainir en une seule étape, mais il peut également être utilisé pour désinfecter vos équipements lorsque la dilution est effectuée en conséquence.

NetMedic⁺ est efficace dans l'eau froide ou dans l'eau chaude. Malgré son pouvoir désinfectant, il reste sans danger pour les surfaces de vos appareils. Si vous possédez une baignoire thérapeutique sans système de désinfection intégrée, l'utilisation du NetMédic⁺ est fortement recommandée.

Mode D'emploi

Pour nettoyer, dégraisser et assainir : appliquer NetMedic⁺ sur les surfaces souillées dans une concentration de 16 à 25 ml par litre d'eau selon le besoin. Le temps de contact recommandé pour assainir est de 60 secondes.

Pour désinfecter : afin d'atteindre un niveau de désinfection (ammonium quaternaire de 3e génération), utiliser le NetMedic⁺ dans une concentration de 38 ml par litre d'eau. Le temps de contact recommandé pour désinfecter est de 10 minutes. Après avoir rincé les surfaces, laisser sécher à l'air libre.

Se référer à l'étiquette pour plus de détails sur l'utilisation du produit.

Données techniques

Famille chimique :	Sel d'ammonium quaternaire
Apparence :	Liquide vert
Odeur :	citrus doux
Solubilité dans l'eau :	Complète
Matériel actif :	14,1%
pH:	13,3

Formats disponibles

Caisse de 4X4 litres (4 gallons)

Caisse de 16X1 litre (pré-dilué et prêt à l'emploi)

Micro-organismes contrôlés

Il est prouvé que NetMedic⁺ est efficace contre les organismes suivants :

<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Proteus mirabilis</i>
<i>Salmonella choleraesuis</i>	<i>Shigella dysenteriae</i>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Trichophyton interdigitale</i>
<i>Streptococcus faecalis</i>	<i>Klebsiella Aerogenes</i>
<i>Salmonella typhosa</i>	<i>V.I.H.</i>
<i>Escherichia coli</i>	

Plusieurs autres micro-organismes peuvent être contrôlés par le NetMedic⁺, mais n'ont pas nécessairement fait l'objet de tests.

1140, rue Neveu, St-Césaire, QC, Canada J0L 1T0

Pour toute information ou pour commander : 1-800-442-2246

ConfortMédic
Technologies Inc.